

- ✓ alkoholfrei
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

DESCOCEPT SPEZIAL

alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel

- besonders gut geeignet für Acrylglas
- hoher Reinigungseffekt
- kurze Einwirkzeiten

CE 0482

als Schaum
applizierbar



PRÄPARATETYP

Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen. **DESCOCEPT SPEZIAL** enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole.

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten.
Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Geruchsneutrale Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art, auch für Acrylglas geeignet. Durch gutes Fettlösevermögen ist **DESCOCEPT SPEZIAL** auch besonders gut für Solarien geeignet.

ANWENDUNG

Zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

WIRKUNGSSPEKTRUM

- bakterizid inkl. MRSA
- levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, Rota-, Papova-/ Polyoma-Viren)

EINWIRKZEIT

Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischdesinfektion), bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH (bei hoher organischer Belastung) 1 Min.*

*gelistet in der 5 Min. Spalte der VAH-Liste

wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-/Grippe-Virus (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) 30 Sek.
Rota-Viren 30 Sek.
Papova-/Polyoma-Viren 2 Min.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind enthalten:
0,50 g Quaternäre Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Form / Farbe: klare, farblose Lösung
pH-Wert (Konzentrat): 6 - 8

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
100 ml Flasche	30 x 100 ml	9489936	00-208-001
500 ml Flasche	20 x 500 ml	10045713	00-208-005
1 L Flasche	10 x 1 L	7396797	00-208-010
5 L Kanister	3 x 5 L	7396805	00-208-050



DESCOSEPT SPEZIAL

alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel

DOSIERHILFEN

Sprühkopf für 1-Liter-Flasche, Schaumsprühkopf für 1 Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

BESONDERE HINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

GUTACHTEN

Prof. Werner, Hygieniker, Bischofshofen:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH Richtlinien.
Gutachten zur Wirksamkeit gegen SV40/Polyoma-Viren gem. EN 14476.

Prof. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/M.:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen.:
Gutachten zur Wirksamkeit gegen Vaccinia-Viren, gem. DW/RKI Leitlinie 2008.
Gutachten zur Wirksamkeit gegen BVDV, gem. DW/RKI Leitlinie 2008.
Gutachten zur Wirksamkeit gegen Rota-Viren, gem. DW/RKI Leitlinie 2008.

PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH und der ÖGHMP.
Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-Liste.de)
Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz:
baua Reg.-Nr.: N-48681, N-48682.
Entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.