

Prontosan® Wound Spray

Reinigung und Befeuchtung von oberflächlichen Wunden und Verbrennungen



Beugt Wundinfektionen vor

Fördert die Wundheilung

Schützt die Wunde vor multiresistenten Erregern (MRSA, VRE, ESBL)

Beugt der Bildung von Biofilm vor⁵

Schmerzarm anwendbar

Gute Hautverträglichkeit

Gute Verträglichkeit mit Katheter- und Sondenmaterialien

Einsatzgebiete

- › Akute und chronische oberflächliche Wunden
- › Riss-, Schnitt-, Schürf- und Bisswunden
- › Leichte Verbrennungen/Verbrühungen
- › Atraumatisches Lösen von verkrusteten Wundverbänden
- › Reinigung der Eintrittspforten von PEG-/PEJ-Sonden, transurethralen und suprapubischen Kathetern
- › Reinigung peristomaler Hautareale

Anwendung

Prontosan® Wound Spray großzügig über die Wundfläche und den Wundrand sprühen, herunterlaufende Lösung mit einer sterilen Kompresse abtupfen. Anschließend mit einem Wundverband abdecken.

Vor der Anwendung von Prontosan® Wound Spray Reste von Salben, Cremes und anderen Wundtherapeutika entfernen.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.



Produkt	Inhalt	VE	PZN	REF
Prontosan® Wound Spray	75 ml	20 Stück	09447292	400565

Inhaltsstoffe: Gereinigtes Wasser, Betain-Tensid,
0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid).