


BD AutoShield™ Duo

Die Sicherheits-Pen-Nadel für eine sicherere Anwendung

Die erste Sicherheits-Pen-Nadel, die für eine sicherere Anwendung Schutz auf der Patienten- UND auf der Penseite bietet.

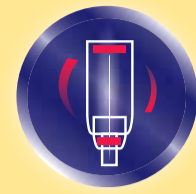

Automatische Doppelte Abschirmung

1. Vorbereitung der Injektion



A Anbringen der Nadel



B Spülen der Nadel



C Ergreifen des Pens mit der Handfläche, Daumen nach oben

2. Injektionstechnik

Technik ohne Hautfalte (empfohlen bei 5-mm-Nadel¹⁾)

Keine Hautfalte und senkrechte Injektion (90°)



Falscher Winkel

¹⁾ Bilden Sie beim Risiko einer intramuskulären Injektion eine Hautfalte.

Technik mit Hautfalte (empfohlen bei 8-mm-Nadel²⁾)

Breite Hautfalte und senkrechte Injektion (90°)



Hautfalte nicht breit genug
Falscher Winkel

²⁾ Bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer möglichen intramuskulären Injektion, kann auf das Anheben einer Hautfalte verzichtet werden.

Die Nadel ist vollständig in die Haut eingedrungen, wenn die weiße Abschirmung die Haut berührt.
Nach der Injektion mit dem Herausziehen der Nadel 10 Sekunden warten.

3. Automatische Doppelte Abschirmung

Auf der Patientenseite bestätigt ein roter Markierungsring die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus. Beim Abnehmen von der Haut arretiert die patientenseitige Abschirmung.

Auf der Penseite ist die Aktivierung des Schutzes an der zurückgesprungenen orangefarbenen Abschirmung zu erkennen, die die Nadel nach der Abnahme vom Pen abdeckt.



4. Sicherere Nadelentsorgung

Die Nadel ist an beiden Seiten abgeschirmt

Entsorgen Sie die gebrauchte Pen-Nadel in einem Abwurfbehälter



Die BD AutoShield™ Duo passt auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie.



Artikel-Nr. 329605 · PZN 7685521



Artikel-Nr. 329608 · PZN 7685538



BD Medical
Diabetes Care
Tullastraße 8-12
69126 Heidelberg
www.bddiabetes.de