


# Protokollbogen

## Standardisierte manuelle Aufbereitung von transvaginalen Ultraschallsonden mit Mikrobac® Virucidal Tissues

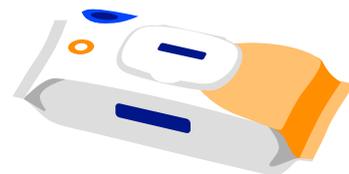

	Aufbereitung	Aufbereitung	Aufbereitung
Gerätename Sonde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seriennummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum Untersuchung	<input type="text" value="        20"/>	<input type="text" value="        20"/>	<input type="text" value="        20"/>
Uhrzeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name der Patientin (optional) beschriften oder aufkleben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Mikrobac® Virucidal Tissues</b>			
LOT Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Haltbar bis:	<input type="text" value="        20"/>	<input type="text" value="        20"/>	<input type="text" value="        20"/>
Geöffnet haltbar bis:	<input type="text" value="        20"/>	<input type="text" value="        20"/>	<input type="text" value="        20"/>
<b>STANDARDISIERTE VERFAHREN:</b>			
<b>VORBEREITUNG</b> Schutzhülle/Gel von der Sonde entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNG</b> 10 Sek. Schaft/10 Sek. Kopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DESINFEKTION</b> 10 Sek. Schaft/10 Sek. Kopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>OPTIONAL:</b> Einkerbung 10 Sek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EINWIRKZEIT: 2 Min.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NACHBEREITUNG</b> Aufbereitungsprozess gemäß den Standardarbeitsanweisungen, der im Validierungsprotokoll niedergelegten Parameter erfolgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgeführt von (Name):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum/Uhrzeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

