



Stülpa®-fix

Anleitung zur Verbandfixierung
mit Netzverbänden



Inhalt

	Seite
Wichtiges über Stülpa-fix	3
Alle Größen auf einen Blick	4
Finger-/Mehrfingerverband	6
Handverband	8
Armverband/Beinverband	9
Fußverband	10
Kopfverband	12
Schulterverband	14
Mammaverband	16
Rumpfverband	18
Oberschenkelverband/Hüftverband	19

Wichtiges über Stülpa®-fix

Stülpa-fix ist ein hochelastischer, weitmaschiger Netzschlauchverband zur schnellen Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen. Selbst komplizierte Verbände sind mit wenigen Handgriffen einfach anzulegen.

Aufgrund der hohen Elastizität und der guten Rückstellkraft sitzen Stülpa-fix-Verbände sicher und faltenlos, ohne einzuschnüren; sie rutschen nicht und leiern nicht aus. Zum Auswechseln der Wundauflage braucht der Fixierverband nicht gewechselt zu werden.

Stülpa-fix kann an jeder beliebigen Stelle und in jeder Richtung durchtrennt oder eingeschnitten werden, ohne weiterzureißen oder auszufransen.

Der hohe Baumwollanteil sorgt für eine gute Hautverträglichkeit. Stülpa-fix ist unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß und kann dampf-sterilisiert werden.

In der vorliegenden Fibel sind die Anleitungen für die gebräuchlichsten Verbände enthalten.

Alle Größen auf einen Blick

Stülpa-fix-Rollen

- Gr. 1 Fingerverbände
- Gr. 2 Hand- und Armverbände, Kinderbein- und Fußverbände
- Gr. 3 Bein- und Fußverbände, Kinderkopfverbände
- Gr. 4 Kopf- und Kinderrumpfverbände
- Gr. 5 Rumpfverbände
- Gr. 6 große Rumpfverbände
- Gr. 7 übergroße Rumpfverbände



Finger-/Mehrfingerverband

Abmessung:

Je nach Fingergröße u. -anzahl
Stülpa-fix Gr. 1 oder Gr. 2,
ca. 30–35 cm

Abmessung:

Je nach Fingergröße u. -anzahl
Stülpa-fix Gr. 1 oder Gr. 2,
ca. 20–25 cm

Version 1



Stülpa-fix zu etwa einem Viertel
über den bzw. die betreffenden
Finger streifen, Schlauchrest
einmal drehen

Version 2



Stülpa-fix etwa zur Hälfte über
den bzw. die Finger streifen,
Schlauchrest einmal drehen

und über die Hand bis zum
Handgelenk stülpen,
an der Handinnenfläche
ca. 5 cm einschneiden



und über den bzw. die Finger
zurückschlagen.



und unverbundene Finger durch
die Öffnung des Verbandes
stecken.



Handverband

Abmessung: Stülpa-fix Gr. 2, ca. 40–45 cm

Stülpa-fix etwa zur Hälfte über die Hand streifen, Schlauchrest einmal drehen und bis zum Handgelenk stülpen,



an der Handinnenfläche in Höhe des Daumenansatzes ca. 2 cm einschneiden



und Daumen durch die Öffnung des Verbandes stecken.



Armverband/Beinverband

Abmessung: Je nach Armumfang/Beinumfang Stülpa-fix Gr. 2 oder Gr. 3, ca. 20–30 cm

Armverband

Stülpa-fix (der Verband sollte die Wundauflage auf jeder Seite etwa 10 cm überdecken), mit beiden Händen dehnen



und über den Arm führen.



Hände nacheinander aus dem Netzschlauch ziehen.



Beinverband

Der Beinverband wird analog dem Armverband angelegt.



Fußverband

Abmessung:

Je nach Fußgröße Stülpa-fix
Gr. 2 oder Gr. 3, ca. 40–50 cm



Von Stülpa-fix etwa ein Drittel
des Schlauchs über die Zehen
streifen,



Verband an der Ferse dehnen,
abschneiden



Schlauchrest einmal drehen,



und so die Ferse freilegen.



über den Fuß bis oberhalb des
Sprunggelenks stülpen,

Kopfverband

Abmessung:

Je nach Kopfgröße Stülpa-fix
Gr. 3 oder Gr. 4, ca. 50–60 cm



Von Stülpa-fix etwa ein Drittel
des Schlauchs mit beiden
Händen dehnen und über den
Kopf bis zum Haaransatz führen,



und so das Gesicht freilegen.



Schlauchrest dehnen, ein- bis
zweimal drehen und über den
Kopf bis zum Halsansatz stülpen,



Die Öffnung des Schlauchendes
lässt das Gesicht frei.



Verband in Augenhöhe ab-
heben, ca. 10 cm waagrecht
einschneiden