



Omnican[®] fine Comfort

Die Penkanülen mit integrierter Entsorgungsbox

Omnican® fine Comfort

Die Penkanülen mit integrierter Entsorgungsbox



Omnican® fine Comfort



2 in 1

Penkanülen

einfach – praktisch – sicher
passen auf alle gängigen
Pen-Injektions-Systeme



Omnican® Box

2 in 1 – Penkanülen mit
praktischer Entsorgungsbox
in einem Set

KAUM SPÜRBAR

Die Omnican® fine Comfort gibt es in vier verschiedenen Längen (4, 6, 8, oder 12 mm). Diese kleinen Hightech-Wunder stehen für eine nahezu schmerzfreie Injektion. Durch den hochfeinen Drei-Facetten-Schliff und die Silikonbeschichtung dringt die Kanüle kaum spürbar in die Haut.

Die Extra-Dünnwand-Technologie (Extra-thin-wall technology) sorgt durch den großen Innendurchmesser für eine optimale Insulin-Durchflussrate und verkürzt die Injektionszeit.

SICHER ENTSORGT

Die Omnican® Box bietet hohen Komfort zur Entsorgung der gebrauchten Penkanülen ohne Berührung der Nadel. Einfach die benutzte Kanüle in die integrierte Vorrichtung stecken, drehen, abwerfen, fertig!



EINFACHE UND SICHERE HANDHABUNG
Sicher und fest mit nur 2 Umdrehungen,
dank neuem elastischen und weichem
Material und dem verbesserten Schraub-
gewinde



KAUM SPÜRBARER EINSTICH
Präziser Drei-Facetten-Schliff und
silikonbeschichtete Nadel

Extra-thin wall

Thin wall

Regular wall



OPTIMALER INSULINFLUSS


Extra-Dünnwand-Technologie für kürzere
Injektionszeit mit weniger Kraftaufwand

Eine sanfte Insulin-Injektion

Auf die richtige Nadellänge kommt es an!

INSULIN-INJEKTION NUR INS FETTGEWEBE


Die menschliche Haut ist etwa 2 mm dick, gleich darunter liegt eine Schicht aus Fettgewebe.¹ Um Schmerz zu vermeiden, sollte die Injektion stets in dieses Fettgewebe erfolgen.

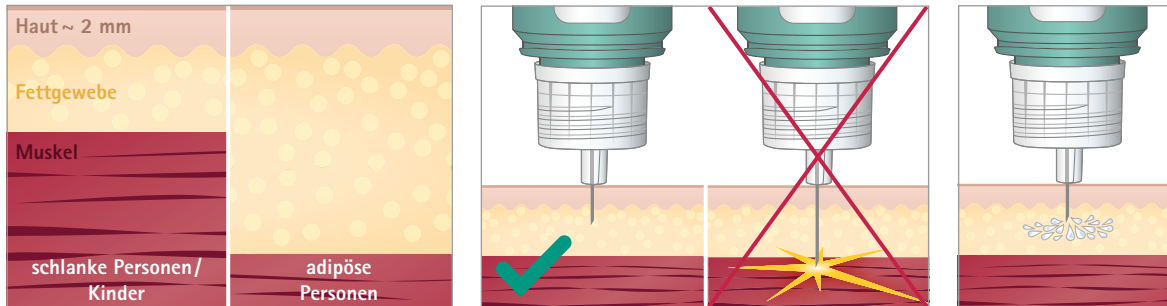

- Das Insulin immer in das Fettgewebe injizieren.
- Intramuskuläre Injektionen vermeiden, andernfalls wird das Insulin unregelmäßig resorbiert und es ist schmerzhaft.^{2,3}
- Für die Insulin-Resorption hängt es nicht davon ab, ob das Insulin mit einer längeren Nadel tief in das Fettgewebe oder mit einer kürzeren Nadel oberflächlich injiziert wird.
- Kurze Nadeln eignen sich am besten, um das Fettgewebe zu erreichen und das Insulin korrekt zu verabreichen – ohne den Muskel zu treffen.⁴

DIE IDEALE NADELLÄNGE

Kurze Nadeln sind sowohl für schlanke als auch für adipöse Personen geeignet und sind genauso effizient wie lange Nadeln.^{1,5,6}

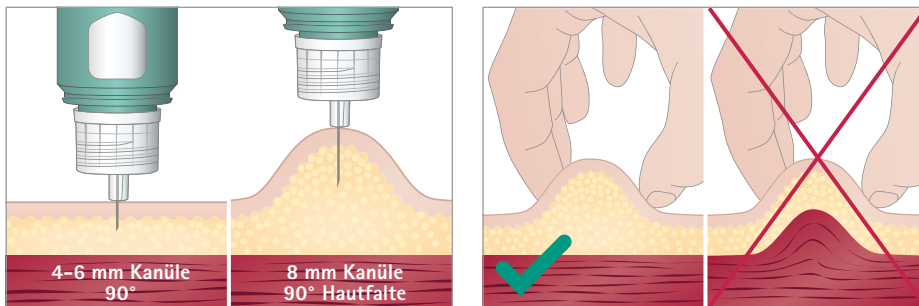


- Alle Patienten können 4-mm-Penkanülen verwenden.¹
- 4-mm-Penkanülen gelten als die sichersten – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.¹
- Je kürzer die Nadel, desto geringer der Schmerz und das Risiko, den Muskel zu treffen.^{5,6}
- Es sollte stets eine Hautfalte gebildet werden, wenn die Nadeln länger als 6 mm sind.
- Im Allgemeinen sollte die Nadel in einem Winkel von 90° eingestochen werden.


Quellen:

- 1) Frid A. et al., New Insulin Delivery Recommendations, Mayo Clinic Proceedings, September 2016; 90(9):1231-1255.
- 2) Karges B. et al., Early hypoglycemia after accidental intramuscular injection of insulin glargine, Diabetes Med, October 2005; 22(10):1444-1445
- 3) Vaag A. et al., Variation in absorption of NHP insulin due to intramuscular injection, Diabetes Care, January 1990; 13(1):74-76.
- 4) Sim K. et al., The Appropriateness of the Length of Insulin Needles Based on Determination of Skin and Subcutaneous Fat Thickness in the Abdomen and Upper Arm in Patients with Type 2 Diabetes, Diabetes Metabolism Journal 2014; 38:120-133.
- 5) Hirsch L. et al., Comparative glycemic control, safety and patient ratings for a new 4 mm 32G insulin pen needle in adults with diabetes. Curr Med Res Opin, June 2010; 26(6):1531-1541
- 6) Bergenstal R. et al., Safety and Efficacy of Insulin Therapy Delivered via a 4mm Pen Needle in Obese Patients With Diabetes, Mayo Clinic Proceedings, March 2015; 90(3):329-338.


Anwendungshinweis

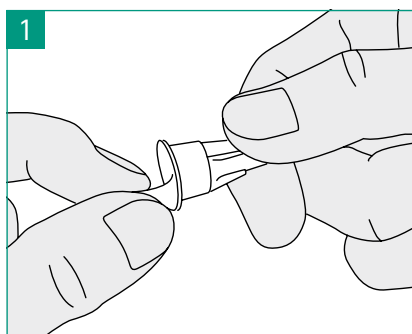


1 Abziehfolie entfernen.

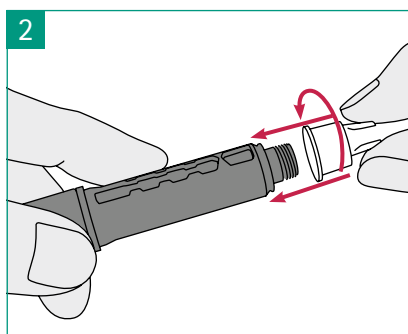


2 Kanüle auf den Insulin-Pen stecken. Die Kanüle muss gerade sitzen.

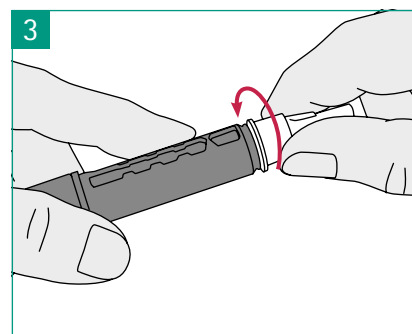


3 Die Kanüle auf den Insulin-Pen schrauben. Die Kanüle muss fest sitzen.

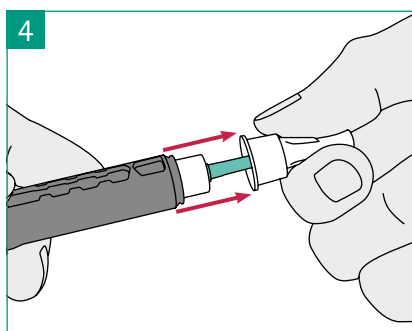

4 Nadel-Behälter entfernen.

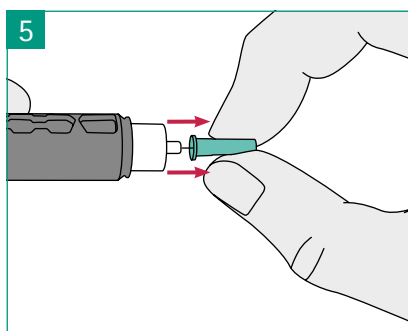

5 Schutzkappe abziehen, ohne die Nadel zu verbiegen.

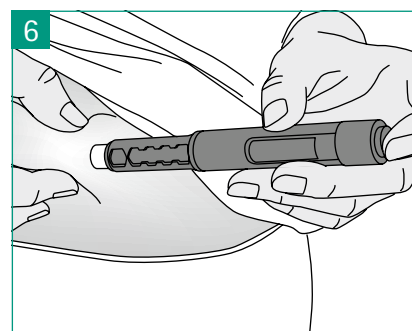

6 Die Insulin-Dosis wählen und gemäß der Gebrauchsanweisung des Pens injizieren.



ACHTEN SIE AUF IHRE SICHERHEIT

Penkanülen sind sterile Einwegprodukte. Durch mehrmalige Verwendung verringern sich die Qualität und die Sicherheit der Kanüle. Wechseln Sie die Penkanüle nach jeder Injektion! Entsorgen Sie die gebrauchten Kanülen in einem Spezialbehälter für scharfe und spitze Abfälle.

Artikel	HiMiV	VE	Art.-Nr.	PZN
Omnican® fine Comfort – die Penkanülen mit einzigartiger Entsorgungsbox				
31G – 0,25 mm x 4 mm	03.99.99.1001	100 Stück	9167846SE	14054850
31G – 0,25 mm x 6 mm	03.99.99.1001	100 Stück	9167668SE	14054867
31G – 0,25 mm x 8 mm	03.99.99.1001	100 Stück	9167684SE	14054873
29G – 0,33 mm x 12 mm	03.99.99.1001	100 Stück	9167641SE	14054896



2 in 1



B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de/diabetes