



ASP[®]

ORIGINAL
Die Dauernadel

➡ Classic

➡ Gold

➡ Titanium



Der Qualitätsstandard
in der Aurikulotherapie

Die Akupunkturnadel der Aurikulotherapeuten

Die 1978 in Frankreich auf Grundlage der Arbeiten von Dr. Paul Nogier entwickelte semi-permanente Nadel von Sedatelec hat einen Maßstab im Bereich der Aurikulotherapie gesetzt.

Jahre der Forschung und Verbesserung unseres Know-how haben dazu geführt, dass die ASP-Nadel heute ein unvergleichliches Qualitätsniveau erreicht hat.

Das legendäre "Klickgeräusch" ist die Garantie für eine äußerst präzise Implantation. Der Anwender kann sich völlig auf das Produkt verlassen und auf diese Weise seine ganze Aufmerksamkeit dem Patienten widmen.

Bei ASP® ORIGINAL handelt es sich um eine sterile Vorrichtung, die das Setzen einer dünnen Nadel von 2 mm in der Ohrmuschel ermöglicht. Versehen mit einem Injektor zum einmaligen Gebrauch gewährleistet sie leichteres Anbringen und höchste Präzision.

Ein richtig eingestellter Druck erzeugt den für die Implantation notwendigen Impuls. Durch die spezielle Nadelform wird gewährleistet, dass sich die Nadel nicht verlagert oder vollständig in das Gewebe eindringt. Einen zusätzlichen Schutz der implantierten Nadel bieten die Klebeplättchen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Die ASP-Nadel wurde entwickelt, um eine Stimulierung des Ohrakupunktur-Punktes bei einer Behandlung über einen längeren Zeitraum hinweg zu ermöglichen.

Aufgrund des Injektors, der die Sterilität der Nadel durchweg sichert, kommt der Arzt beim Implantieren zu keinem Zeitpunkt mit der Nadel selbst in Berührung. Die Nadeln sind einzeln verpackt, sodass der Praktiker einen Teil der ASP-Nadeln im Blister verwenden kann, ohne die Sterilität der übrigen Akupunkturnadeln zu schädigen.


Die Vorzüge von ASP® ORIGINAL

Stimulationsmagnet

An der Spitze des Injektors von ASP Classic und ASP Gold befindet sich ein bipolarer Magnet, der eine regelmäßige Stimulierung der gesetzten Nadel ermöglicht. Der Patient kann den Injektor mit Magnet auch außerhalb der Praxis selbst anwenden.

Plättchen für besseren Halt

Die im Lieferumfang von ASP enthaltenen Klebeplättchen werden aus mikroporösem Trägermaterial hergestellt und mit einer antiallergischen Klebmasse beschichtet. Sie werden bei Bedarf eingesetzt, um ein Verlagern der gesetzten Nadel zu verhindern.

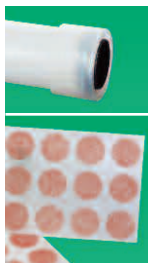

Wirkungsweise von ASP® ORIGINAL

In den 50er Jahren hat Dr. Paul Nogier die Zusammenhänge zwischen bestimmten Krankheiten und der Druckempfindlichkeit spezieller Punkte der Ohrmuschel nachgewiesen. So wurde die Aurikulotherapie ins Leben gerufen. Bei dieser Technik werden Punkte oder Bereiche der Ohrmuschel stimuliert, um das physiologische Gleichgewicht gestörter Organe oder Systeme wiederherzustellen. Ihre Wirkung erklärt sich durch die sehr hohe Innervation der Ohrmuschel und die zahlreichen Verbindungen zum zentralen Nervensystem.

Die semi-permanente ASP-Nadel wurde speziell für die Behandlung dieser pathologischen Punkte entwickelt. Sie kann mehrere Tage (10 bis 20 Tage) an der Ohrmuschel verbleiben, wo sie auf diese Weise eine dauerhafte Stimulation der Punkte gewährleistet. Diese besonders effiziente Nadel hat sich schnell als wertvolles therapeutisches Hilfsmittel für Aurikulotherapeuten durchgesetzt.

Indikationen

Haupt-Indikationen für den Einsatz von ASP-Nadeln sind chronische Schmerzen, psychische Störungen (Depressionen, Angstzustände, Schwindelanfälle...), chronische Funktionsstörungen sowie Gewöhnungsbeschwerden (Alkoholismus, Nikotinismus...).

Die seit 30 Jahren im Handel erhältlichen Akupunkturadeln kommen heute täglich weltweit bei zahlreichen Praktikern, in Krankenhäusern und Schmerzkliniken zur Anwendung.

Gegenanzeigen

Um die Zweckmäßigkeit einer Behandlung mit Aurikulotherapie zu bestimmen, muss zuvor eine vollständige medizinische Diagnose erstellt werden.

Bei Patienten, bei denen im Bereich des Akupunkturpunktes Hautinfektionen vorliegen oder bei Patienten mit künstlichen Herzklappen, ist ein Setzen von ASP zu vermeiden.

Bei der Behandlung schwangerer Frauen, hämophiler Personen und Personen, die blutgerinnungshemmende Mittel einnehmen, sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Drei metalle für drei Anwendungsbereiche



ASP Classic Nadel aus ROSTFREIEM STAHL ohne NICKEL.

Die sterile Nadel zum einmaligen Gebrauch bewährt sich seit mehr als 30 Jahren bei Behandlungen der AURIKULOTHERAPIE.

ASP Gold Nadel aus Stahl mit einer Beschichtung aus reinem GOLD.

ASP Gold eignet sich insbesondere für die Behandlung von Allergikern.

ASP Titanium Nadel aus massivem TITANIUM, medizinischer Gütegrad 4.

Die neueste ASP-Nadel zeichnet sich durch höchste Biokompatibilität aus. Sie wird bevorzugt bei der Behandlung von Risikopatienten - Diabetikern, Patienten mit Immundefekten oder multiplen Allergien - eingesetzt. Sie kann während einer IRM Untersuchung an ihrem Platz bleiben.

Qualitätsgesichertes Herstellungsverfahren

Produktkontrolle

ASP® ORIGINAL wird in sterilen Reinnräumen und entsprechend strengster Qualitätsnormen hergestellt, sortiert und verpackt.

Die Fertigung und Sortierung der Produkte erfolgt durch automatisierte maschinelle Anlagen, die speziell von uns entworfen wurden, um eine einwandfreie serienmäßige Produktion der Nadel zu gewährleisten.

Die Nadeln werden mit Röntgenstrahlen gereinigt und desinfiziert und weisen somit vor dem Sterilisationsvorgang optimale keimfreie Sauberkeit auf. Durch Druckkontrolle, Tests zu einwandfreier Extraktion und die Überprüfung der Nadeln in ihren einzelnen Bestandteilen werden auch kleinste Produktfehler aufgedeckt. Sollte ein Produkt als nicht-konform identifiziert werden, wird ein internes Analyseverfahren eingeleitet, das zur Optimierung unseres Fabrikationsprozesses beiträgt.

Alle obligatorischen Vermerke befinden sich auf den Blistern, den Verpackungen und der Gebrauchsanweisung. Insbesondere durch die vermerkte Postennummer können alle Komponenten und Materialien, die bei der Herstellung der Nadeln eingesetzt wurden, zurückverfolgt werden. Diese Rückverfolgbarkeit garantiert die Herkunft unserer Rohmaterialien und sichert ein hohes Reaktivitätsniveau falls bei der Anwendung Beschwerden auftreten sollten.

Kontrolle der Herstellungsräume

Der Reinraum, in dem die ASP-Nadeln hergestellt werden, unterliegt sehr genauen und eingehenden Kontrollverfahren, die den strengsten Qualitätsnormen entsprechen.

ASP® ORIGINAL erfüllt des weiteren alle Normen der aktuell anerkannten Prüfverfahren zur Biokompatibilität. Die Infektionsrate durch Mikroben wird ebenfalls von einem anerkannten unabhängigen Labor ständig überprüft.



Geeignete Sterilisation


Die Sterilisation durch Gammastrahlung eignet sich hervorragend für Gesundheitsprodukte. Die Gammastrahlung gewährleistet eine qualitativ hohe Sterilisation und eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.

Einige Beispiele für klinische Protokolle

(Auszug aus NATOM Auriculo)


Nikotinentwöhnung

2 ASP homolaterale Anwendung am O'-Punkt
5 Akupunkturnadeln
Punkte werden in Bezug auf Patienten bestimmt

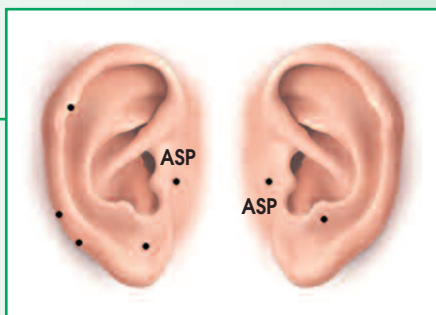


Allergische Rhinitis

1 ASP am Allergiepunkt
1 Akupunkturnadel im Bereich Leber 15'
2 Akupunkturnadeln homolateral
am Nasenpunkt

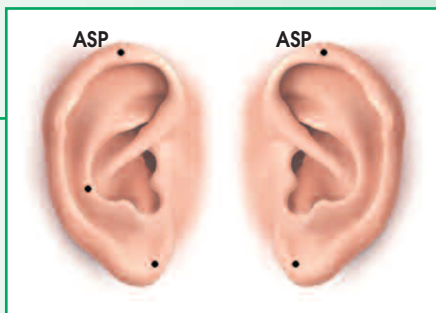

Gesichtsneuralgie

1 ASP am Antitragus
1 transfixiante Nadel vom Trigemini-Punkt bis zum
Antitragus durch den Zahn-Kiefer-Punkt
3 Anwendungen im Abstand von 1 Monat

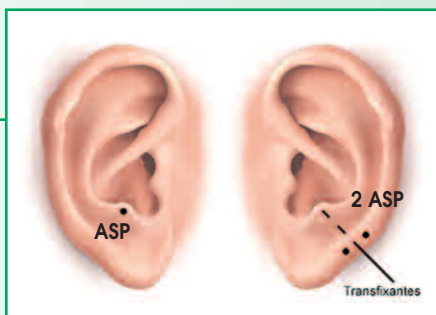

Sie möchten ASP-Nadeln testen?

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne eine Test-Box,
die 4 ASP Classic, 4 ASP Gold und 4 ASP Titanium enthält.

Benutzerfreundliche Verpackungseinheiten

Die Nadeln werden einzeln in Blisterkammern verpackt, wobei sich 8 Nadeln in einem Blister befinden. Drei unterschiedliche Verpackungseinheiten sind erhältlich:



Der sogenannte Pack Solo mit 8 Nadeln

ermöglicht das Mitführen einer begrenzten Anzahl an Akupunkturnadeln außerhalb der Praxis.

Die Verpackungseinheit von 80 Nadeln

eignet sich insbesondere für die erste Ausbildungsphase zum Aurikulotherapeuten oder bei begrenztem Einsatz als Unterstützung von anderen Heilmethoden.

Die Packung mit 200 Nadeln

gilt als Standardformat, das am besten auf die Anwendungspraxis des Aurikulotherapeuten zugeschnitten ist. Die leicht verschließbare Packung, die sich auch für den Verkaufsständer oder Präsentiertisch eignet, schützt und vereinfacht die Handhabung der Blister.

ASP-Nadeln aus bereits geöffneten Packungen können weiterhin mühelos identifiziert werden, was Praktikern, die alle drei Nadelnarten benutzen, sehr entgegenkommt.

Stets im Lieferumfang enthalten sind Schutzklebeplättchen und eine Gebrauchsanweisung.

Ihr Fachhändler:



Chemin des Mûriers • F-69540 Igny • Lyon • France
Tel. +33 (0) 472 663 322 • Fax +33 (0) 478 508 903
sedatelec@sedatelec.com
www.sedatelec.com