

DEU

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

MARKE: OptiLubereach™

ZUSAMMENSETZUNG: 100g enthalten:

- Glycerin 0,80g • PEG 15,4g
- 4-Hydroxybenzoesäureester 0,0308%
- Natriumhydroxid 0,24% • Gereinigtes Wasser 82,73%

ANWENDUNG: Als Gleitmittel verwenden.

GEGENANZEIGEN: Empfindlichkeit auf Glyzerin.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Um die Tube zu öffnen, zerbrechen und drehen Sie das Ende der Düse. Drücken Sie den Körper der Tube zusammen, um das Gel zu lösen. Entsorgen Sie die Tube und verbleibendes Gel nach dem Gebrauch. Nur zum einmaligen Gebrauch.

EMPFOHLENE VERWENDUNG:

Das OptiLubereach™ Gel ist ein sicheres und effektives Gleitmittel für den medizinischen oder persönlichen Gebrauch. Das Gleitmittel ist empfohlen für:

- Einführen von Kathetern
- Endoskopie
- Einsmieren von Kondomen
- Rektale Thermometer
- Allgemeine Anwendungen in Krankenhäusern
- Während des Geschlechtsverkehrs
- Einläufe/Duschen
- Gynäkologische Untersuchung
- Digitale und instrumentale Untersuchungen.

OptiLubereach™ ist unbedenklich für das menschliche Gewebe und Gummi und schädigt keine Instrumente, Geräte, natürliche oder synthetische Textilien. OptiLubereach™ ist kein Verhütungsmittel.

NEBENWIRKUNGEN UND BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN:

Vorsichtsmaßnahmen: Wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt sind, dann ist die Sterilität nicht mehr gewährleistet.

Warnhinweise: Bei Reizung die Anwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen. Augenkontakt vermeiden. UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN.

KENNZEICHNUNG: Gel ist steril, transparent, wasserlöslich, fettfrei und leicht.

GRÖSSEN:

Tuben: 5g, 15g

LAGERHINWEIS:

Lagerung zwischen 5 - 30°C



optimum medical solutions

08/2013 • Version 3.0



Optimum Medical Solutions - Deutschland

Hohenstaufenring 62, 50674 Köln, Deutschland

Tel.: +49 (0) 221-2601 6334

Fax: +49 (0) 221-2601 6335

info@optimummedical.de

www.optimummedical.de